

TRUE TEST® 36

Thin-layer **R**apid **U**se **E**picutaneous TEST

De enige ready-to-use-test

Geen voorbereiding nodig

Accuraat en reproduceerbaar

Maak van TRUE TEST 36

uw **eerste keus**
in patchtesten

 **SmartPractice®**
Because patients deserve a diagnosis™

Visit TRUETEST.COM for more information

Distributor for the Netherlands and Belgium: Bipharma
NL: 036-5278000 | BE: 03-244 18 37 | bph@bipharma.com | www.bipharma.com

ID-nr: TT-FLY-017/1

Het unieke design van TRUE TEST 36

GELAMINEERDE BUITENFOLIE;


Luchtdicht en ondoorzichtig, beschermt de test tegen licht en vocht.

DUNNE BESCHERMFOLIE:

Bescherm de patches tegen beschadigingen tijdens opslag en bij het openen van de folie.

TAPE MET LIJMLAAG:

Elke patch is bevestigd op een occlusieve en hypoallergene non-woven chirurgische tape.

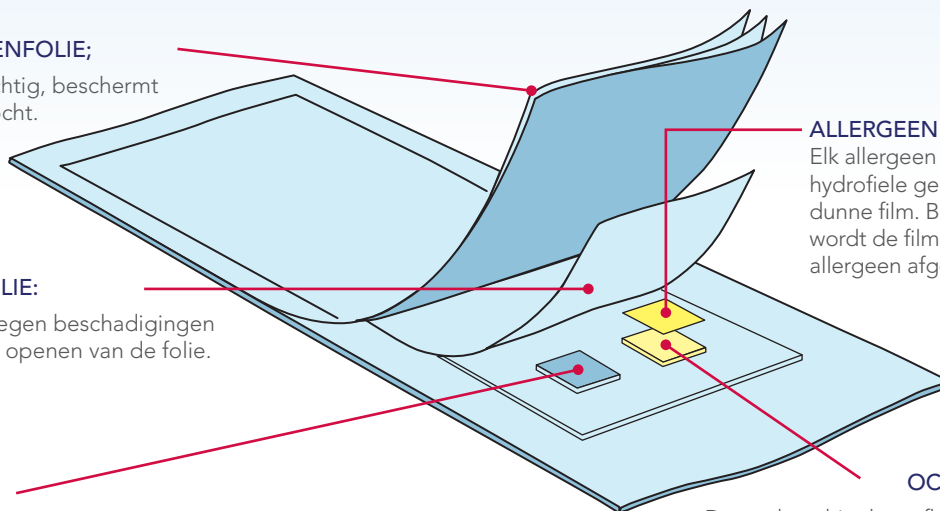

ALLERGEEN GEÏMPREGNEERDE FILM:

Elk allergeen is ingebed in een hydrofiële gel die is gedroogd tot een dunne film. Bij aanbrengen op de huid wordt de film vochtig en wordt het allergeen afgegeven aan de huid.

OCCLUSIEVE PLASTIC RUG:

De ondoordringbare flexibele rug verzekert een optimaal contact tussen huid en de allergenen en bevordert maximale huidpenetratie.

Snel en gemakkelijk aanbrengen

1

Open de verpakking en haal de pleisters eruit.

2


Verwijder de plastic beschermfolie van het testoppervlak van de pleisters.

3

Plaats de pleisters op de bovenrug van de patiënt.

4

Markeer, met een medische markeerstift, op de huid de plaats van de twee inkepingen van iedere pleister.

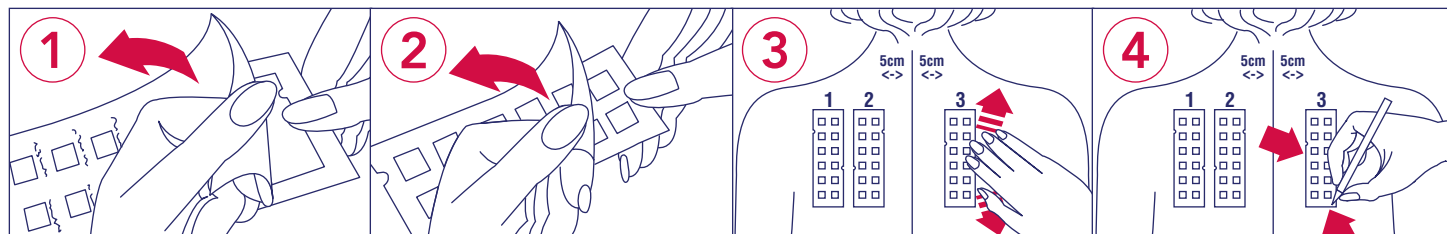

PANEL 1

Allergeen	mcg/cm ²
1. Nikkelsulfaat	200
2. Wolvetalcoholen	1000
3. Neomycinesulfaat	600
4. Kaliumdichromaat	54
5. Caïnemengsel	630
6. Caïnemengsel	430
7. Colofonium	1200
8. Parabenenmengsel	1000
9. Lege patch	
10. Perubalsem	800
11. Ethylenediamine dihydrochloride	50
12. Kobaltchloride	20

PANEL 2

Allergeen	mcg/cm ²
13. p-tert-Butylfenolformaldehydehars	45
14. Epoxyhars	50
15. Carbamengsel	250
16. Zwart rubber-mengsel	75
17. Cl+Me-isothiazolinone	4
18. Quaternium-15	100
19. Methyl dibroomglutaronitril	5,0
20. p-Fenyleendiamine	80
21. Formaldehyde	180
22. Mercaptomengsel	75
23. Thiomersal	7
24. Thiurammengsel	27

PANEL 3

Allergeen	mcg/cm ²
25. Diazolidinylureum	550
26. Chinolinemengsel	190
27. Tixocortol-21-pivalaat	3,0
28. Goudnatriumthiosulfaat	75
29. Imidazolidinylureum	600
30. Budesonide	1,00
31. Hydrocortison-17-butyraat	20
32. Mercaptobenzothiazol	75
33. Bacitracine	600
34. Parthenolide	3,0
35. Dispers blauw 106	50
36. 2-broom-2-nitro-1,3-propaandiol	250